

Hämostaseologie

Hinweise zur Präanalytik

Sarstedt-Abnahmesystem

Sehr geehrte Einsender,

! Sie haben bei uns Sarstedt Citrat 9NC-Röhrchen mit **3,0ml Füllvolumen** geordert.
Durch einen Lieferengpass bedingt senden wir Ihnen ersatzweise Sarstedt Citrat 9NC-Röhrchen mit **4,3ml Füllvolumen**.

Bitte beachten Sie, dass sich die korrekte Füllhöhe bei der Blutentnahme unterscheidet:

3,0 ml



4,3 ml



Die Füllung bis zum **jeweiligen Füllstrich** ist aufgrund der unterschiedlichen Citrat-Menge im Röhrchen und der davon abhängigen Laborwerte **UNBEDINGT ERFORDERLICH!** Eine korrekte Bestimmung der angeforderten Gerinnungsparameter ist sonst nicht möglich!

Bitte informieren Sie die Mitarbeiter:innen, die mit Probenentnahme und -bearbeitung beauftragt sind.

Wir danken für Ihre Hilfe.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr MVZ Labor Ravensburg
Hämostaseologie